


Présentation du cathéter Chartis® Precision XL

La nouvelle génération de cathéter d'évaluation de la ventilation collatérale :

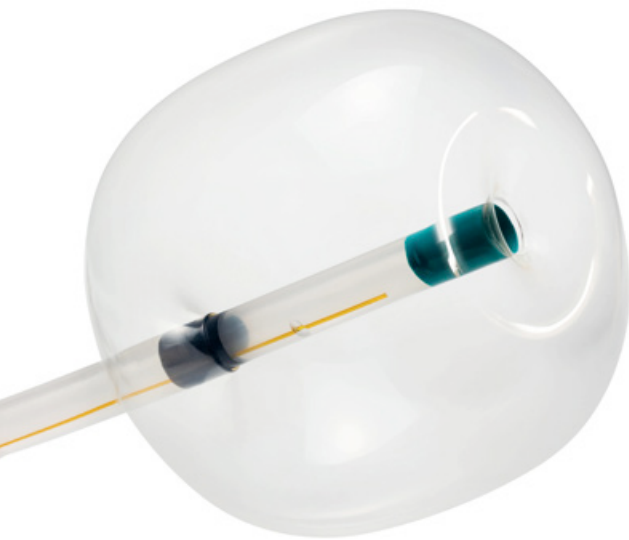

1 Amélioration du profil du ballon

- Facilite le positionnement lors des interventions. Sa conception aide les cliniciens à naviguer dans la carène distale et réduit le risque d'obstruction.

2 Portée étendue

- Permet de cibler une plus large gamme de zones, y compris les voies lobaires courtes.

3 Force d'insertion modifiée

- Le diamètre de tige plus fin facilite le passage dans le bronchoscope.

4 Simplification de l'installation

- Livré avec tous les accessoires nécessaires et les robinets pré-attachés pour simplifier la préparation.

5 Compatibilité avec les bronchoscopes


- Forme optimisée pour éviter les plis dans le canal opérateur des bronchoscopes de 2,8 mm.

Amélioration du profil du ballonnet :

- Le diamètre maximal du ballonnet est atteint vers l'extrémité distale, ce qui facilite l'évaluation des voies aériennes courtes.
- Le ballonnet est conçu pour réduire le contact avec la carène distale et minimiser les obstructions de mucus.
- Le ballonnet peut atteindre un diamètre maximal de 13 mm pour permettre l'évaluation des voies aérienne de gros diamètre.



Ballonnet de cathéter
Chartis Precision

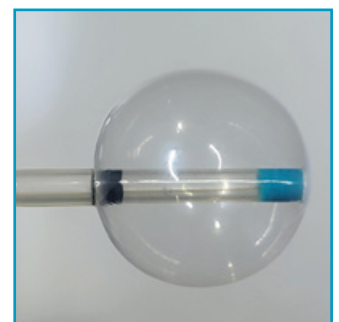

Ballonnet
Chartis G3

Facilité d'utilisation :



- Les robinets pré-attachés réduisent les étapes d'assemblage.
- Le diamètre de tige plus fin facilite le passage dans le bronchoscope.

Informations de commande

- Numéro SKU : CHR-CA-1.0

Informations de sécurité importantes : Le système Chartis® est indiqué pour une utilisation par des bronchoscopistes durant une bronchoscopie de diagnostic chez des patients adultes atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d'emphysème, dans une salle de bronchoscopie. Le système, qui se compose du cathéter Chartis et de la console Chartis, est conçu pour mesurer la pression et le flux afin de calculer la résistance à l'écoulement de l'air et de quantifier la ventilation collatérale dans des compartiments pulmonaires isolés.

Le cathéter Chartis est utilisé dans l'ensemble du canal opérateur d'un bronchoscope et il est raccordé à la console Chartis. La console Chartis est un équipement essentiel réutilisable qui affiche les informations du patient. Le système Chartis est contre-indiqué en présence d'une infection active ou d'une diathèse hémorragique majeure. On ne connaît pas de substances susceptibles d'interférer avec le système. Ce dispositif doit être utilisé exclusivement par un médecin ayant suivi une formation. Avant utilisation, consulter le mode d'emploi/manuel d'utilisation du système Chartis, où vous trouverez des informations supplémentaires concernant les indications, les contre-indications, les mises en garde, toutes les précautions à prendre et les événements indésirables.

Pulmonx International SARL
Av. de la Gare 2, 2000 Neuchâtel, Suisse

© 2025 Pulmonx Corporation ou ses sociétés affiliées.
Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de Pulmonx Corporation et de ses sociétés affiliées.

Cathéter Chartis® Precision XL
EMA-FR-2738-v1

www.pulmonx.fr

zephyr®
by pulmonx